


Welke zijn de injectieplaatsen?

Insuline kan geïnjecteerd worden in de buik, de armen, de dijen of de billen.

De werking van de insuline hangt af van de injectieplaats.

+ sneller

- sneller

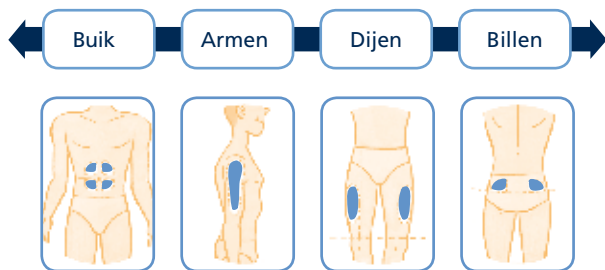

Dit document werd u persoonlijk overhandigd door uw arts. De hierin gegeven informatie is bestemd voor gezondheidseducatie.

novonordisk.be

Customer Service

02 556 06 07


FAX 02 556 06 06

info.nobelux@novonordisk.com



NovoPen®, NovoFine® en de Apisstier zijn merknamen, eigendom van Novo Nordisk A/S, Denemarken

Hoe moet ik
mijn herbruikbare
NovoPen® 4
gebruiken?

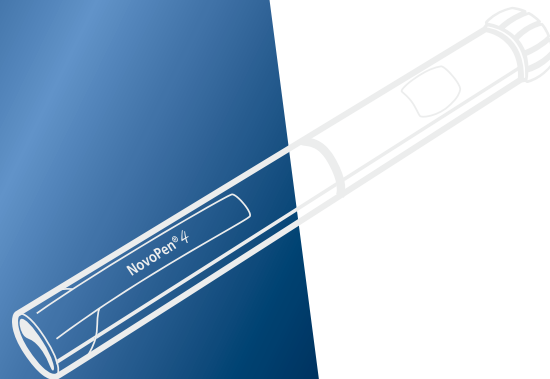

changing
diabetes®



Gebruik van NovoPen® 4

Plaatsen van de patroon en de naald



1 Schroef de patroonhouder los.



2 Duw de kop van de stamper in de pen door op de kop van de stamper te drukken.



3 Plaats de patroon in de patroonhouder.



4 Sluit de patroonhouder.



5 Schroef de NovoFine® naald op de patroon.

Ontluchten van de patroon



6 Stel 4 eenheden in voor een nieuwe patroon. Stel 1 eenheid in voor een patroon in gebruik.



7 Tik enkele keren zacht tegen de patroon.



8 Duw de drukknop volledig in. Indien nodig, herhaal stappen 6, 7 en 8 totdat er een druppel insuline verschijnt aan de naaldtip.

Selecteren en injecteren van de dosis



9 Trek aan de drukknop en selecteer het aantal gewenste eenheden.



10 Plaats de naald in de huid, volgens de aangeleerde injectietechniek en druk de drukknop in tot u een "klik" hoort.

Gebruik de injectiemethode aanbevolen door uw arts of verpleegkundige.