


Zijn NovoPen® 6 et NovoPen Echo® Plus compatibel met mijn smartphone?

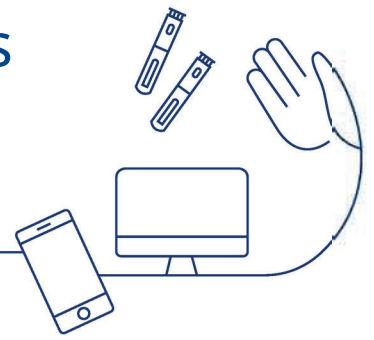

Hoe kan je dit weten?

Als je de 3 volgende vragen met ja kunt beantwoorden, is jouw smartphone compatibel met NovoPen® 6 en NovoPen Echo® Plus:

- ✓ Heeft jouw smartphone een NFC-interface (Near Field Communication)?
- ✓ Is het besturingssysteem van jouw smartphone compatibel?
- ✓ Wordt jouw voorkeur app ondersteund door het besturingssysteem van jouw smartphone?


De NFC-interface bevindt zich op een andere locatie op jouw smartphone, afhankelijk van het model. Je kunt hier enkele voorbeelden zien.



iPhone X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro Max, Pro, SE, 12



Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S20, S21

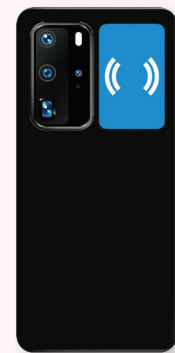

Huawei P10 Lite, P20, P30 Pro, P40 Pro

Je kunt de individuele specificaties van jouw smartphone vinden in de gebruiksaanwijzing of je kan deze aanvragen bij je smartphone verkoper.

De volgende besturingssystemen zijn compatibel

	Modellen	Besturingssystemen
	iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro Max, Pro, SE, 12	iOS 13 en hoger
	Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10, S20, S21	Android: 8, 9, 10, 11
	Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3	Android: 8, 9, 10
	Nexus 5X	Android: 8
	P10 Lite, P20, P30 Pro, P40 Pro	Android: 8, 9, 10

Van deze smartphones is gekend dat ze compatibiliteitsproblemen hebben:

- Samsung Galaxy S6 (alle Galaxy S6-modellen werken niet met NovoPen® 6)
- iPhone 7: iOS 14.4.2 kan geen gegevens overdragen als een volledig dosisrecord moet worden geüpload

Hoe kan je de juiste app voor jouw smartphone vinden?

Neem contact op met de ontwikkelaar van je voorkeur app voor het gebruik van NovoPen® 6 & NovoPen Echo® Plus om een overzicht van compatibele smartphones te ontvangen. Scan deze QR code om meer info te hebben.

